



GEBRAUCHSANWEISUNG

OUTDOOR ROLLATOR



Der Outdoor-Rollator ist mit einer Feststellbremse und einem Sitz mit Polsterlehne ausgestattet. Die Griffhöhe ist einstellbar und der Rollator kann zum Transport oder zur Lagerung zusammengeklappt werden.

Vor dem Zusammenklappen oder der ersten Benutzung des Rollators ist die Gebrauchsanweisung genau zu lesen und an einem sicheren Ort aufzubewahren.

Vor dem genauen Lesen dieser Gebrauchsanweisung darf das Gerät NICHT zusammengeklappt oder benutzt werden.

BESTIMMUNG

Das Gerät dient als Geh-, Stütz- und Traghilfe beim Tragen kleinerer Gegenstände sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Es ist für den Gebrauch durch einen Benutzer mit einer beschränkten Bewegungsfähigkeit und dem nachstehend genannten maximalen Körpergewicht bestimmt.

Um die Sicherheit des Benutzers des Rollators zu gewährleisten, ist erforderlich, dass der Benutzer entsprechende körperliche, Seh- und kognitive Fähigkeiten besitzt. Im Zweifel kontaktieren Sie den Verkäufer/ Spezialisten, der die Nutzung eines Rollators empfohlen hat.

Es ist sehr wichtig, dass der Benutzer vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung genau zur Kenntnis nimmt. Die hier genannten Hinweise sollen eventuelle Körperverletzungen des Benutzers oder Dritter, sowie Beschädigung des Rollators oder der anderer Gegenstände verhindern.

HINWEIS

Auf den einzelnen Teilen des Rahmens darf nicht gestanden werden. Der Rahmen des Gerätes ist nicht zu solchem Zweck vorgesehen.

SICHERHEIT

Der Rollator kann durch eine Person mit einem Gewicht von max. 135kg benutzt werden.

ES IST ZU BEACHTEN:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Bremse eines unbeaufsichtigt gelassenen Rollators immer gesperrt/eingerastet ist.
2. Vor dem Gebrauch vergewissern Sie sich, dass alle Räder sicher befestigt sind.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Bremsen richtig funktionieren.
4. Vor dem ersten Gebrauch prüfen Sie die Griffhöhe und ihre richtige Befestigung.
5. Vergewissern Sie sich, dass der Rollator vollständig aufgeklappt ist.
6. Beim Aufklappen des Rollators muss der Rahmen in die richtige Position gebracht werden.
7. Halten Sie ihre Finger vom Klappmechanismus fern, da diese ansonsten leicht eingeklemmt werden können.
8. Um den Rollator an Ihre Bedürfnisse gut anzupassen, lassen Sie sich vom Fachpersonal beraten.

ES IST VERBOTEN:

1. Den Rollator zum Fahren von Personen zu benutzen – das Gerät wurde nicht als Rollstuhl entwickelt.
2. Sich auf den Rollator zu setzen ohne dass zuvor die Bremse blockiert wurde. Ohne aktivierte Feststellbremse könnte sich der Rollator in Bewegung setzen und somit könnte es zu Körperverletzungen des Benutzers oder von Dritten kommen.
3. Sich bei Neigung auf den Rollator zu setzen, ohne zuvor die Feststellbremse zu aktivieren.
4. Sich mit Schwung auf den Sitz zu setzen. Setzen Sie sich vorsichtig und kontrolliert hin – bei Bedarf bitten Sie um Hilfe.
5. Auf den Bremshebeln oder Griffen keine Gegenstände hängen, denn das kann die Funktion der Bremsen und/oder die Stabilität des Rollators beeinträchtigen.
6. Sich auf den Rollator zu stellen oder ihn als Fußstütze zu nutzen.

AUFBAUANWEISUNG

Vergewissern Sie sich, dass der Rollator während des Transports nicht beschädigt wurde. Bei sichtbaren Beschädigungen benutzen Sie den Rollator nicht. In solchem Fall kontaktieren Sie den Verkäufer, um den Rollator reparieren zu lassen oder ihn zurückzugeben.



1. Die Verpackung beseitigen. Der Rollator ist zusammengeklappt.
2. Den Rollator aufklappen, den Sitz auf beiden Seiten nach unten drücken (s. Abb. 1). **HINWEIS:** Beide Seiten müssen in einer entsprechenden Stellung mit dem hörbaren „Klick“ gesperrt werden.
3. Die Schultertasche aufhängen.



Abb.1

HÖHENEINSTELLUNG

Vor dem ersten Gebrauch des Rollators vergewissern Sie sich, dass er vollständig aufgeklappt ist und dass der Rahmen richtig gesperrt und steif ist. Es ist wichtig, die Höhe des Rollators richtig zu einer komfortablen Position einzustellen. Zu diesem Zweck lassen Sie die Hände an den Seiten hängen und stellen Sie die Griffe des Rollators auf der Höhe der Handgelenke ein.

1. Beim Greifen der Griffe sollten die Ellenbogen im Winkel von 15° – 20° gebogen werden.
2. Sind Sie gezwungen, sich zu neigen oder die Arme zu heben, um den Rollator zu erreichen, korrigieren Sie die Höhe.
3. Um die Höhe zu ändern, drehen Sie die Flügelschraube heraus und stellen den Griff auf die benötigte Höhe ein. Wiederholen Sie die Tätigkeit auf der anderen Seite des Rollators und prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob beide Griffe auf dieselbe Höhe eingestellt und richtig gesperrt sind.



Abb.2

HINWEIS: Um die richtige Höhe des Rollators festzulegen, kontaktieren Sie den Arzt oder Fachhändler.

EINSTELLUNG UND BEDIENUNG DER BREMSEN

Betriebsbremse (beim Schieben): Ziehen Sie die Bremshebel nach oben.

Feststellbremse (beim Parken):
Drücken Sie die Bremshebel nach unten
(s. Abb.3).

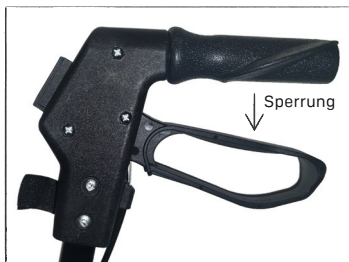


Abb.3

Bremseinstellung: Um die Spannung des Bremsseils zu erhöhen, drehen Sie die Regulationsschraube gegen den Uhrzeigersinn; anschließend – um solche Einstellung beizubehalten – drehen Sie den Befestigungsknopf im Uhrzeigersinn und halten Sie dabei die Regulationsschraube fest (s. Abb. 4).

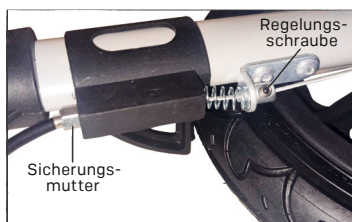


Abb.4

HINWEIS: Bei jeglichen Unsicherheiten kontaktieren Sie den Kundendienst. Veränderungen an den Einstellungen der Bremse kann zu verminderter Bremskraft führen.

ZUSAMMENKLAPPEN UND LAGERUNG DES ROLLATORS

Ziehen Sie den Riemen im mittleren Teil des Sitzes nach oben, um den Rollator zusammenzuklappen (s. Abb. 5).



Abb.5

WARTUNG

1. Vergewissern Sie sich, dass ALLE Ausstattungsteile immer richtig zuge dreht sind.
2. Prüfen Sie, ob die Schrauben, Knöpfe und Drehknöpfe der Räder und der beweglichen Räder zugeschraubt sind. Prüfen Sie, ob die Bremse richtig funktioniert und vergewissern Sie sich, dass die Griffe richtig gesichert sind.
3. Abgenutzte oder beschädigte Teile sind unverzüglich auszutauschen.

REINIGUNG

Zur Reinigung des Rollators benutzen Sie ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm und warmes Wasser mit Seife. Bei Bedarf können auch gängige Desinfektionsmittel benutzt werden. Vergewissern Sie sich, dass auf den gereinigten Flächen kein Wasser oder Reinigungsmittelreste zurückbleiben. Benutzen Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Kratzgeräte, da sie die Lackschicht beschädigen können.

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR
UNS ENTSCHIEDEN HABEN

